



新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● View アレルギー 36 (View36)

(依頼コード No.856)

受託開始日 2014年1月6日(月) 受付分より

View アレルギー 36 (View36) は、アレルゲンを特定する特異的 IgE 検査 (CAP 検査) の抗原をそのままに 36 種類の抗体を同時に検索できる検査です。これにより、多種のアレルギー疾患に対応でき、その原因把握に有用です。

受託要領

依頼コード No.	856
検体必要量	血清 0.9mL
容器	B-1→S-1
検体の保存方法	冷蔵
所要日数	2~3
検査方法	FEIA 法
基準値	インデックス値: 0.27 未満
単位	なし
報告範囲	0.27 未満 ~ 29.31 以上
報告桁数	小数第2位
検査実施料 / 判断料	1430 点 / 144 点 (免疫学的検査)

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3

総合研究所: 〒350-1101 埼玉県川越市の場 1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station

●【構成アレルゲン】

吸入系抗原		食餌系抗原	
室内塵	ヤケヒョウヒダニ	卵	卵白
	ハウスダスト1		オボムコイド
動物	ネコ皮膚	牛乳	ミルク
	イヌ皮膚	小麦	小麦
昆虫	ゴキブリ	豆、穀、 種実類	大豆
	ガ		ソバ
樹木	スギ		ピーナッツ
	ヒノキ		米
	ハンノキ(属)	ゴマ	
	シラカンバ(属)	エビ	
草本類	カモガヤ	甲殻類	カニ
	ブタクサ	果物	キウイ
	ヨモギ		リンゴ
空中真菌	アルテルナリア	魚・肉類	鶏肉
	アスペルギルス		牛肉
真菌その他	カンジダ		マグロ
	マラセチア(属)		サケ
	ラテックス		サバ

● クラス判定表

判定	クラス	インデックス値	
陰性	0	0.27 未満	
疑陽性	1	0.27 以上	0.50 未満
陽性	2	0.50 以上	1.80 未満
	3	1.80 以上	7.05 未満
	4	7.05 以上	17.35 未満
	5	17.35 以上	29.31 未満
	6	29.31 以上	

View36とCAP シングルアレルゲン検査との相関(クラス)

All

6						3	
5				2	6	2	
4			5	26	1		
3			6	71	5		
2	2	15	61	13			
1	8	20	18				
0	98	14	1				
	0	1	2	3	4	5	6

CAP シングルアレルゲン
 陽性一致率：201/220=91.4%
 陰性一致率：98/108=90.7%
 判定一致率：319/377=84.6%

d1 ヤケヒョウヒダニ

6						2	
5					1	1	
4				3	1		
3				4	2		
2				5	1		
1				3			
0	5	2					
	0	1	2	3	4	5	6

CAP シングルアレルゲン
 陽性一致率：20/20=100%
 陰性一致率：5/5=100%
 判定一致率：28/30=93.3%

f1 卵白

6						2	
5				2	2		
4				4	3		
3				8	1		
2				5	1		
1	1	6					
0	10	1					
	0	1	2	3	4	5	6

CAP シングルアレルゲン
 陽性一致率：28/28=100%
 陰性一致率：10/11=90.9%
 判定一致率：44/46=95.7%