

## 新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



### 項目名

● 結核菌 IFN- $\gamma$  測定 (T-SPOT. TB) (依頼コード No.1737)

受託開始日 2014年5月19日(月) 受付分より

T-SPOT. TB は結核感染の診断補助を目的として、結核菌特異蛋白刺激によって T 細胞から遊離したインターフェロン- $\gamma$  (IFN- $\gamma$ ) を免疫染色し、染色スポット数を IFN- $\gamma$  産生 T 細胞数として計測・判定する検査で、IGRA (Interferon-Gamma Release Assays) と呼ばれる検査法の一つです。ツベルクリン反応と比較して、感度、特異度ともに優れ、特に BCG 接種が広く普及している日本において有用性の高い検査法であるとされています。

### 受託要領

依頼コード No.	1737
統一コード	5E301-0000-019-031
検体必要量	血液 10.0mL
採取容器	B-18 (ヘパリン Na)
検体の保存方法	必ず室温 (安定性: 32 時間まで)
所要日数	5 ~ 7 日
検査方法	ELISPOT 法
基準値	(-)
報告形式	(-), (+), 判定保留、判定不可 ※ 判定保留および陽性 (8 ~ 19 スポット) の場合は スポット数を別紙報告いたします。
検査実施料 / 判断料	630 点 / 144 点 (免疫学的検査)
提出条件	<曜日指定> 受託可能日: 月 ~ 金 (休日前日の受付は不可) 必ず採取当日にご提出ください。 検診等、一度に多数のご出検を予定される場合は、 事前に最寄りの営業所までご相談ください。 開封厳禁
備考	判定保留は再度血液を採取して再検査を行うことが 推奨されます (他の診断方法を含む)。

【参考文献】 原田登之, 他: モダンメディア 54, 148-153, 2008.

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3

総合研究所: 〒350-1101 埼玉県川越市の場 1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

電子カルテはビー・エム・エル

**Qualis**  
Medical Station