

PIVKA-IIご依頼の際の 採血容器の注意点

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび PIVKA-II 検査の試薬会社(エーディア株式会社)より、採血時にニプロ株式会社製の急速凝固採血管(下記)を用いた場合、PIVKA-II の測定値が低下する事象が確認されたとの報告がありました。つきましては、該当容器による PIVKA-II 測定へのご使用は避けていただくようお願い申し上げます。なお、弊社検査案内記載の容器(B-1)を用いた場合は問題ありません。

謹白



項目名

PIVKA-II 定量

(依頼コード No.2910)

(本検査は 2016 年 3 月 28 日(月)受付分より試薬変更となります)

該当急速凝固採血管

販売名(販売元)：ネオチューブ及びフリーチューブ(ニプロ株式会社)

品名(全 34 品目)：

ネオチューブ RC シリーズ

OP-RC0507-SH, OP-RC0507-SH2, OP-RC0507-S, OP-RC0507-S2,
NP-RC0809-SH, NP-RC0809-SH2A, NP-RC0509-SH, NP-RC0509-SH2,
NP-RC0507-SH, NP-RC0507-SH2A, NP-RC0305-SH, NP-RC0809-PH,
NP-RC0507-PH, NP-RC0305-PH, OP-RC0507-SH, OP-RC0507-SH2,
NP-RC0809-S, NP-RC0509-S, NP-RC0509-S2, NP-RC0507-S,
NP-RC0507-SH2A, NP-RC0507-S2, NP-RC0305-S, NP-RC0809-P,
NP-RC0507-P, NP-RC0305-P, OP-RC0507-S, OP-RC0507-S2,
NP-RC0809-ST, NP-RC0509-ST2, NP-RC0507-ST, NP-RC0305-ST,
OP-RC0507-ST

フリーチューブ RC

■急速凝固促進剤が検体中の PIVKA-II に作用して測定値に影響を及ぼしたものと推察されています。

■上記急速凝固採血管を使用されたお客様で再検査をご希望される場合には弊社担当営業にお申し出ください。

