

肺癌ALK/IHC・D5F3 アレクチニブ塩酸塩への適応拡大承認のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、アレクチニブ塩酸塩の非小細胞肺癌患者への適応を判定するための補助についても使用目的に追加されましたので、お知らせいたします。

謹白



項目名

● 肺癌ALK/IHC・D5F3

(依頼コード No.17511)

ALK/IHC・D5F3検査は、ALK阻害剤であるクリゾチニブ、セリチニブの使用可否を決めるコンパニオン診断薬であり、適切な患者選別を行うための検査として2017年8月に販売承認されていましたが、この度、ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社のベンタナOptiView ALK(D5F3)がアレクチニブ塩酸塩についても適応が拡大されましたので、お知らせいたします。

また、3剤に共通のコンパニオン診断薬であることから、一次治療で用いたALK阻害剤の耐性または、増悪後に別のALK阻害剤を使用する際に再度検査が不要です。

受託要領

依頼コードNo.	17511
検体必要量	未染色スライド標本4枚(切片は4μm厚)/パラフィン包埋ブロック
検体の保存方法	室温
検査方法	免疫組織化学染色(IHC)
報告形式	陽性/陰性
所要日数	7~10
保険点数	2700点
検体提出上のご注意	・必ずシラン等のコーティングスライドをご使用ください。 ・臨床診断名、臨床所見は判定上必要となりますので、ご記入ください。 ・ご施設での固定の際には、10%中性緩衝ホルマリンで6~72時間の固定が推奨されております。

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play

Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station