

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● PD-L1/SP142 乳癌

(依頼コード No.17532)

受託開始日 2019年12月2日(月) 受付分より

既存の乳癌検査であるHER2、ER、PgRの全てが陰性となり、ハーセプチン治療やホルモン治療の効果が見込めないといわれているトリプルネガティブ乳癌が知られています。

「PD-L1/SP142乳癌」検査は、これらの患者に対して免疫チェックポイント阻害剤(アテゾリズマブ)の投与効果を事前に予測するためのコンパニオン検査です。

既存の検査に「PD-L1/SP142 乳癌」検査が加わることにより、乳癌患者に対する治療法選択の幅が広がることが期待されます。

受託要領

依頼コード	17532
検体の必要量	・未染色スライド標本4枚(切片は4μm厚) ・パラフィン包埋ブロック(別途スライド作製料が必要)
検体の保存方法	室温
測定方法	免疫組織化学染色(IHC)
報告日数	7~10日
検査実施料	2700点
検体提出のご注意	・必ずシラン等のコーティングスライドをご使用ください。 ・病理診断名、病理所見は判定上必要となりますので、ご記入ください。 ・10%中性緩衝ホルマリンで6~72時間の固定が推奨されております。 ・依頼書の「臨床診断及び臨床情報」欄に固定時間をご記入ください。 ・FFPEブロックで提出の場合、別途料金がかかります。

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play

Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station