

PD-L1/22C3(乳癌)検査 保険適用拡大のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、新たな適応疾患を追加して検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

記

項目名

● PD-L1/22C3(乳癌)

(依頼コード No.13052)

受託開始日 2021年10月8日(金) ご依頼分より

2017年に保険収載されたPD-L1検査は、今日までに様々な腫瘍に保険適用が拡大されてきました。今回、【PD-L1/22C3検査】でトリプルネガティブ乳癌が拡大対象となり、免疫チェックポイント阻害剤「ペムブロリズマブ」の適切な投与を行うために用いられます。この度、本検査の受託体制が整いましたので受託開始をご案内いたします。下記、検体提出のご注意をご確認の上、ご提出お願い申し上げます。

受託要領	依頼コード No.	13052
	検体必要量	・未染色スライド標本4枚(切片は4 μ m厚) ・パラフィン包埋ブロック
	検体の保存方法	室温
	検査方法	免疫組織化学染色(IHC)
	所要日数	7~10
	保険点数	2700点
	検体提出のご注意	・必ずシラン等のコーティングスライドをご使用ください。 ・病理診断名、病理所見は判定上必須となりますので、ご記載ください。(可能であれば、病理報告書の添付をお願いいたします。) ・コーティングスライドは冷暗所で保存した7.5ヶ月以内の未染色スライド標本あるいは25℃以下の室温で保存した4ヶ月以内の未染色スライド標本のご提出をお願いいたします。 ・腫瘍細胞数100個以上が確認された組織のご提出をお願いいたします。 ・10%中性緩衝ホルマリンで12~72時間の固定検体が推奨されています。 ・脱灰や他の固定液を使用して処理された組織は推奨されていません。 ・パラフィン包埋ブロックで提出の場合、別途標本作製料金が発生します。

●報告内容 PD-L1発現 CPS10%未満、CPS10%以上

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station