

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● EGR1
(del(5)長腕欠失)

(依頼コード No.11563、57112)

※ 弊社システムの都合により2つの
コードNo.があります。

受託開始日 2016年7月1日(金) 受付分より

本検査は、EGR1プローブを用いた FISH 法により5番染色体長腕(5q31領域)の欠失を検出します。骨髄異形成症候群(MDS)の独立した病態とされている単独異常としての「5q-症候群」の欠失は、5q13~5q33の間で起こる中間部欠失であり、5q31~q33が共通欠失領域とされています。予後は良好で、他のMDSが男性優位であるのに対し女性優位で、中高齢者に多く認められます。5q-症候群ではレナリドミド(サリドマイド誘導体)が著効を示すことが知られていますが、近年5q-症候群に限らず、5q-を伴う複合異常が認められるMDSや急性骨髄性白血病(AML)でも効果を示すことが報告されています。このことから、5q31欠失の有無の確認は、治療選択の上で有用な情報になります。G分染法では検出不能の場合や、5q-の症例における治療効果をみる上でも有用です。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play

Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station

受託要領

検査項目名	EGR1 del(5)
依頼コードNo.	11563、57112
統一コード	8B356-0000-019-841
検体必要量	血液(ヘパリン加血) 3.0mL 骨髄液 0.5mL
容器	血液 B-18 骨髄液 X-2
検体の保存方法	冷蔵(凍結不可)
所要日数	5～10
検査方法	FISH法
基準値	設定なし
単位	なし
報告範囲	なし
報告桁数	なし
検査実施料/判断料	2712+(分染法加算397)点/ 125点(血液学的検査)

【測定法の参考文献】

稲澤 譲治：FISH 実験プロトコール，128-136，1994。（秀潤社）