

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| ● CEA/CLIA (癌胎児性抗原) | (依頼コード No.165) |
| ● AFP/CLIA (α -フェトプロテイン) | (依頼コード No.166) |
| ● CA19-9/CLIA | (依頼コード No.746) |
| ● CA125/CLIA | (依頼コード No.836) |
| ● CA15-3/CLIA | (依頼コード No.837) |

受託開始日 2016年9月26日(月) 受付分より

腫瘍マーカー 5項目につきまして、測定精度の向上を期し、化学発光免疫測定法 (CLIA 法) による受託を開始いたします。診断補助、治療効果判定、経過観察等の一助として上記腫瘍マーカー検査をお役立ていただきますようお願い申し上げます。

※ 現行項目のCEA: 依頼コードNo.887、AFP: 依頼コードNo.886、CA19-9: 依頼コードNo.685、CA125: 依頼コードNo.4796、CA15-3: 依頼コードNo.4797は、2017年4月に今回ご案内のCLIA法への試薬変更を予定しております。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3
総合研究所: 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1
☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

Qualis
Medical Station

受託要領

依頼（報告）コードNo.	165	166	746	836	837
検査項目名	CEA/CLIA	AFP/CLIA	CA19-9/CLIA	CA125/CLIA	CA15-3/CLIA
統一コード	5D010-0000-023-051	5D015-1352-023-051	5D130-0000-023-051	5D100-0000-023-051	5D120-0000-023-051
検査材料	血清	血清	血清	血清	血清
検体必要量	0.5mL	0.5mL	0.5mL	0.5mL	0.5mL
容器	B-1→S-1	B-1→S-1	B-1→S-1	B-1→S-1	B-1→S-1
検体の保存方法	冷蔵	冷蔵	冷蔵	冷蔵	冷蔵
所要日数	2～3	2～3	2～3	2～3	2～3
検査方法	CLIA法	CLIA法	CLIA法	CLIA法	CLIA法
基準値	5.0以下	10.0以下	37.0以下	35.0以下	31.3以下
報告単位	ng/mL	ng/mL	U/mL	U/mL	U/mL
報告範囲（報告形式）	0.5未満～最終値	2.0未満～最終値	2.0未満～最終値	1.0未満～最終値	0.5未満～最終値
報告桁数	小数第1位	小数第1位	小数第1位	小数第1位	小数第1位
検査実施料/判断料	108点/144点(生(Ⅱ))	110点/144点(生(Ⅱ))	134点/144点(生(Ⅱ))	152点/144点(生(Ⅱ))	124点/144点(生(Ⅱ))
備考	【チャート報告書】 Tumor Marker 検査専用チャートの報告対象項目です。				

新試薬と従来試薬の相関

