

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、新規項目として受託体制が整いましたので受託開始をご案内申し上げます。

謹白



項目名

● p16 E6H4

(依頼コード No.17557)

受託開始日 2025年1月15日(水) 受付分より

2025年1月1日より子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)が疑われる患者であって、HE染色で腫瘍性病変の鑑別が困難なものに対し、診断の補助を目的とした組織中のp16タンパクを検出する検査として保険収載されました。

この度、本検査の受託体制が整いましたので受託開始をご案内いたします。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book

Google play

Available on the
App Store

電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

依頼コード	17557
検体の必要量	・未染標本3枚(切片は4 μ m厚) ・パラフィン包埋ブロック
検体の保存方法	室温
測定方法	免疫組織化学染色(IHC)
報告形式	陽性/陰性/判定不能
所要日数	7~13
実施料/判断料	720点
検体提出のご注意	<ul style="list-style-type: none"> ・材料固定時間:10%中性緩衝ホルマリンを使用し、15~25℃にて6時間以上72時間以内が推奨されています。 ・脱灰やホルマリン以外の固定液を使用して処理された材料は推奨されていません。 ・病理診断名、病理所見は本検査判定時の必須事項のため検査依頼書に記入が必要です。(病理報告書コピーを添付の場合、記入は不要です。) <p>【未染標本の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・必ずシラン等のコーティングスライドをご使用ください。 <p>【パラフィン包埋ブロックの場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・別途標本作製費用が発生します。 <p>※対象疾患以外の検体で免疫染色 p16 を依頼する場合は、免疫染色1枚(5951)をご依頼ください。</p>