

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

●トキソプラズマ抗体IgM(S/CO)

(依頼コード No.14335)

受託開始日 2026年7月27日(月) ご依頼分より

トキソプラズマ症は原虫の*Toxoplasma gondii*による人畜共通感染症です。一般的に感染してもほとんどが不顕性感染ですが、免疫不全状態で感染すると重篤化することがあります。また、妊娠中の初感染では、胎盤を通じて胎児に感染し、先天性トキソプラズマ症を発症する可能性があります。

トキソプラズマ抗体IgM測定は、急性感染や最近の初感染を評価する検査として重要です。

現在、弊社で受託しているトキソプラズマ抗体IgM検査は「Index値」で報告しておりますが、このたび、現行項目と同様の測定試薬を用いて、「S/CO値」で報告する項目を新設しましたのでご案内いたします。

- 当該検査の受託開始に伴い、現行のトキソプラズマ抗体IgM(依頼コードNo.13374)は2027年3月31日(水)ご依頼分をもって検査の受託を中止させていただきます。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

	新規受託項目	ご参考：現行項目
検査項目名 及び 依頼（報告） コード No.	14335(親)トキソIgM(S/CO) ----- (子)23855 判定 (子)23856 S/CO	13374(親)トキソプラズマ抗体IgM ----- (子)22604 判定 (子)22605 Index
JLAC10コード	5E157-0000-023-051	同左
検体必要量	血清 0.5mL	同左
容器	B-1 → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	2～3	同左
検査方法	CLIA法	同左
基準値	判定：(－) S/CO：0.83未満	判定：同左 Index：0.50未満
単位	なし	同左
報告範囲 (報告形式)	判定：(－)、(±)、(+) S/CO：0.83未満～最終値	判定：同左 Index：0.50未満～最終値
報告桁数	判定：なし S/CO：小数第2位	判定：同左 Index：同左
検査実施料/判断料	95点/144点(免疫学的検査)	同左

●新規受託項目の判定基準

判定	S/CO
(－)	0.83未満
(±)	0.83～1.00未満
(+)	1.00以上

●現行項目の判定基準

判定	Index
(－)	0.50未満
(±)	0.50～0.60未満
(+)	0.60以上

●新規受託項目の「S/CO」と現行項目の「Index」との変換式は、測定試薬添付文書に次のように示されています。

$$S/CO = \text{Index} \div 0.60$$