

p16/ki67 二重免疫染色検査 受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして検査の受託を開始いたしますので、ご案内申し上げます。

謹白



● 項 目 名

● p16/ki67 二重免疫染

(依頼コードNo.17578)

受託開始日 2026年8月17日(月) 受付分

この度、p16タンパク/ki-67タンパク二重免疫染色が、2026年7月1日保険適用されました。

この検査により、子宮頸部前癌病変を有する可能性が高い患者を正確に選別し、直ちにコルポスコピーが必要か否かを判断する指標となります。

【参考文献】

[1]ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社, CINtecPLUS Cytology Dual Stain 添付文書

[2]ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社, ベンタナCINtecPLUS Cytology Dual Stain検査ガイド

[3]日本産科婦人科学会, 「p16 タンパク/ki-67 タンパク二重免疫染色 病理診断標本作製」保険収載と検査の取り扱いに関するお知らせ

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場 1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



受託要領

依頼コード	17578
検査項目名	p16/ki67 二重免疫
検体の必要量	本検査用に採取された検体の他に、細胞診の残余検体でも受託可能です。
容器	ThinPrep  SurePath 
検体の保存方法	室温
測定方法	二重免疫細胞染色 (ICC) 法
報告形式	陽性・陰性・判定不能
所要日数	10日
保険点数	1067点
検体提出のご注意	1. 予め行われた細胞診検査でベセスダ分類上LSILと判定された患者様に対してコルボスコピーまたは生検の要否を判断することを目的として実施した場合に限り保険適用されます。 2. 受託可能な検体は「ThinPrep」もしくは「SurePath」容器のみとなります。 3. スライドガラスでの依頼は受託できません。 4. 弊社で細胞診検査された検体を使用して検査の依頼をされる場合は、専用依頼書に該当検体の標本番号を必ずご記入ください。 5. 受託可能期間は採取からThinPrep：5週間、SurePath：4週間となります。 ※ただし、弊社の検体保管期間は1ヶ月です。 6. 免疫染色のみの依頼は受託できません。 7. 依頼書は専用依頼書をご使用ください。

【専用報告書】

判定結果は陽性・陰性・判定不能のいずれかが表記されます。

※細胞数が5,000個に満たない場合は判定不能となる可能性があります。

p16 / Ki67 二重免疫染色検査報告書		受託番号	
00000-12345.01 ○○クリニック 様		PCL 26/06/25 89900	
受付日	2026/06/24	受付No.	003-8875
依頼科	入院・外来	検査日	2026/06/22
患者氏名	PCL ハナコ 様	年齢	54才
検査項目	0032019 p16/Ki67 二重免疫染色	性別	女性
■p16/ki67 二重免疫染色 判定結果:陽性			
【判定基準】 クローム名 p16:EBH4 ki67:274-11ACSV1 陽性:同一細胞に p16 と ki67 共に発現 陰性:同一細胞に p16 と ki67 の一方もしくは共に発現なし 判定不能:細胞量不足(5,000個以下)、バックグラウンド染色、アーチファクト			
細胞検査士: ○○		細胞診専門医: ○○	
 株式会社PCL JAPAN 検査センター 検査実施所: 九品 様		検査日 2026/07/25	